

# Quatre Étapes pour la Collecte des Cheveux

1

1. Nettoyez les ciseaux et la barrette avec un chiffon imbibé d'alcool.
2. Séparez les cheveux du donneur horizontalement sur toute la longueur de la couronne et fixez les cheveux à l'écart avec une barrette.
3. Coupez environ 20 à 30 mèches de cheveux sur CINQ petites zones le long de la ligne au niveau du cuir chevelu.
4. Coupez l'échantillon de cheveux le plus près possible du cuir chevelu.

**REMARQUE :** Vous devriez collecter un total de 90 à 120 mèches de cheveux, ou l'équivalent d'une paille simple. Prenez plus de mèches si la longueur des cheveux du donneur est inférieure à 4 cm. Si vous prélevez des poils, prélevez un échantillon d'une taille équivalente à celle d'une boule de coton de 2,5 cm.



## Outils de collecte :


1. Barrette à cheveux
2. Ciseaux
3. Stylo à bille
4. Lingette alcoolisée

2

1. Placez le CÔTÉ RACINE sur le BORD supérieur du Hair Specimen Transport pour l'échantillon de cheveux (HST) marqué PLACE ROOT END HERE.
2. Lissez les cheveux sur toute leur longueur le long de la ligne centrale du HST en maintenant les pointes des racines ensemble au bord de la feuille.
3. Rabattez le HST sur la ligne centrale.
4. Repliez de nouveau dans le SENS DE LA LONGUEUR.
5. Tout cheveu plus long que la feuille doit être enroulé autour de la feuille une fois pliée.
6. Placez dans la POCLETTE D'ÉCHANTILLON.

**REMARQUE:** Les personnes faisant la collecte peuvent plier la feuille plus serrée ou ajouter un pli supplémentaire dans le sens de la longueur pour les cheveux bouclés si nécessaire.

**REMARQUE:** Il n'est pas nécessaire d'aligner les pointes des racines si vous collectez des poils corporels.

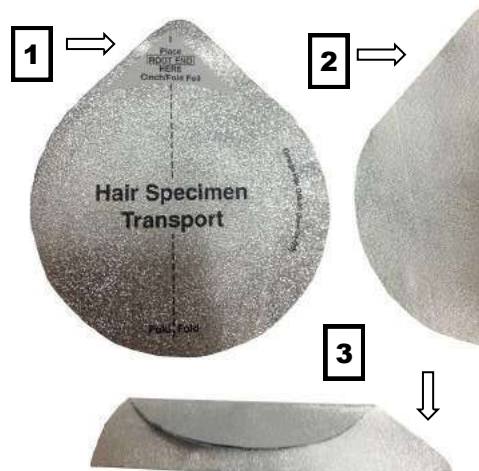

3

Une fois que l'échantillon est dans la POCLETTE D'ÉCHANTILLON, scellez la POCLETTE avec l'AUTOCOLLANT fourni sur le FORMULAIRE DE CONTRÔLE ET RESPONSABILITÉ en vous assurant que celui-ci fixe complètement le grand rabat.

Après avoir apposé l'autocollant sur la pochette, demandez au donneur d'apposer ses initiales et de dater le sceau de la pochette dans les champs prévus à cet effet et remplir l'étape 5 (ombrée en bleu clair) de la copie 1 du FCC.



4

Placez le POCLETTE D'ÉCHANTILLON scellée et la copie 1 du FORMULAIRE DE CONTRÔLE ET RESPONSABILITÉ (copie blanche) dans le SAC DE TRANSPORT en plastique transparent et fermez le sac avec le rabat adhésif joint.

L'échantillon est maintenant prêt à être expédié.



## VEUILLEZ NE PAS OUBLIER :

1. Effectuez PLUSIEURS coupes, NE PAS prélever l'échantillon complet à un seul endroit.
2. VOUS DEVEZ marquer sur le formulaire de la chaîne de contrôle (ÉTAPE 2) si l'échantillon est un poil HEAD (cheveu) ou BODY (corporel).
3. NE MÉLANGEZ PAS les cheveux et les poils corporels. COLLECTEZ SEULEMENT L'UN OU L'AUTRE des types de poil.
4. N'ENVOYEZ PAS plus d'un HST par POCLETTE D'ÉCHANTILLON. Des échantillons multiples entraîneront le rejet de l'échantillon.

# Conseils Utiles Pour la Collecte de Cheveux

Cheveux	Conseils pour la collecte
<b>Cheveux courts</b>	Si les cheveux mesurent moins de 4 cm, ramassez plus de mèches pour tenir compte de la différence de poids. Recueillir à plusieurs endroits pour éviter de laisser des taches de calvitie. Les cheveux de moins de 4 cm peuvent être placés au centre de la feuille.
<b>Cheveux longs</b>	Si les cheveux sont plus longs que 4 cm, après avoir aligné les pointes des racines et plié la feuille dans le sens de la longueur deux fois, enroulez simplement la longueur restante autour de l'extérieur de la feuille.
<b>Cheveux bouclés</b>	Si vous avez de la difficulté à garder les pointes des racines alignées sur les cheveux bouclés, demandez à un autre collecteur de vous aider en tenant les cheveux déjà recueillis pendant que vous effectuez des coupes supplémentaires. Pincez la feuille autour de l'échantillon fini tout en le pliant pour garder les extrémités des racines alignées.
<b>Cheveux fins</b>	Collectez les cheveux à plusieurs endroits pour éviter de créer des taches de calvitie. Si la longueur est de 4 cm ou plus, n'oubliez pas de garder les extrémités des racines alignées à l'extrémité appropriée de la feuille.
<b>Tresses Dreadlocks Tissages</b>	Si un donneur a des cheveux artificiels ou synthétiques reliés à des cheveux réels, le donneur doit les enlever avant le prélèvement. Assurez vous que tous les cheveux recueillis poussent depuis le cuir chevelu. Faites une note sur le Formulaire indiquant que les divers poils artificiels ont été enlevés pour s'assurer qu'il y a une documentation appropriée.
<b>Poils corporels</b>	Si un donneur a des cheveux très courts (moins de 1 cm) ou n'a pas de cheveux, il faut alors prélever les poils corporels. Les pointes des racines n'ont pas besoin d'être alignées pour les poils corporels. Prélevez un échantillon d'une taille équivalente à celle d'une boule de coton de 2,5 cm. Les poils corporels peuvent être prélevés sur plusieurs parties du corps (y compris le visage) et mélangés ensemble dans le papier d'aluminium pour obtenir la quantité nécessaire pour le test. Les poils corporels et les cheveux NE PEUVENT PAS être mélangés en raison des différences de délais dans les tests.
<b>Poils de la nuque</b>	Lorsque vous prélevez les poils de la nuque, veillez à garder les pointes des racines alignées et placez-les à l'extrémité appropriée de la feuille. Recueillez la quantité recommandée et indiquez l'endroit où elle a été recueillie dans la section Remarques du Formulaire. Les poils de la nuque sont considérés comme des cheveux.

## Comment demander des services supplémentaires

*Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer*

**Lorsque vous demandez des options supplémentaires de test de cheveux NON imprimées sur le Formulaire, veuillez utiliser la méthode suivante :**

1. Rayez les mentions pré-imprimées « Test à effectuer » de la section E.

2. Cochez la case « Autre (précisez) » \_\_\_\_\_

3. Fournissez les pièces d'identité appropriées pour le test demandé.

**EXEMPLE** E. Tests de drogues à effectuer  Cheveux 5  Cheveux 5 + Opiacés  Autre (précisez) \_\_\_\_\_

### Indication des services supplémentaires

**Segmenté :** Le test par défaut concerne un délai de prise de drogue sous les 90 derniers jours. Sauf indication contraire, tout test demandé allant au-delà de ces 90 jours sera segmenté en sections de 90 jours (1 an = 0-90, 90-180, 180-270, 270-360). Le laboratoire a également la capacité de segmenter les échantillons en segments d'un mois, de deux mois et de trois mois.

**Veillez NE PAS** couper les cheveux en segments multiples, ils seront segmentés correctement une fois reçus au laboratoire.

Si vous avez besoin de délais différents, veuillez l'indiquer comme décrit ci-dessous :

**Veillez indiquer la durée des segments par plage de jours - Exemple : (0-30, 30-60, 60-90), (0-60, 60-120, 120-180)**

**Opiacés étendus :** Si l'option de test n'est PAS pré-imprimée sur votre Formulaire, indiquez en écrivant Cheveux 5 + Opiacés externes dans « Autre (préciser) » \_\_\_\_\_